

使っていいね! 入れ歯ケース

特長

- コンパクトにたためて携帯にも便利なシリコーンゴム製の入れ歯ケースです。
- フック掛けができるので洗浄・乾燥時に便利です。

使用方法

●使用時

フタを外し、本体後ろからつまみ(フック穴部)を引き上げます。
※本体内側の一番上の折りたたみ線が150mLの目安になります。

つまみ
(フック穴部)




内容量150mLの目安線




●収納時

本体の上から押し、完全にたためてからフタを被せます。

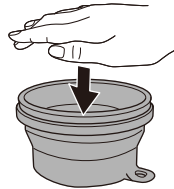

完全に
たたまれた状態

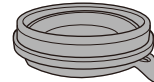

使用上の注意

- 本品は密閉容器ではありません。
- 用途以外での使用はしないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 薬剤などにより本体に色がつくことがあります。品質上の問題はありません。
- 初期状態ではシリコーンゴム特有の臭いがすることがありますが、徐々に弱くなっていきます。また、衛生上の心配はありません。
- 柔らかい素材のため、持ち運び時に容器が変形して内容物がこぼれないよう注意してください。
- 汚れがついた場合は、中性洗剤で洗ってください。
- みがき粉やクレンザー、たわしなど硬いものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 容器を持ち上げるときは、必ず本体をお持ちください。
- 入れ歯洗浄を行う際は、入れ歯洗浄剤の取扱方法、使用上の注意にしたがってください。
- 洗浄中はフタは軽くのせてください。携帯時は紛失防止のため、フタと本体はしっかりとめ込んでください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592

お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN CHINA

材 質 本体:シリコーンゴム
フタ:ポリプロピレン

耐熱温度 本体:140℃
フタ:100℃

容 量 260mL



4 973655 184622