


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途

- 本品は浴そうの出入りと浴そう内での姿勢保持の補助具としてお使いください。

特長



- 体格や浴そう壁に合わせて手すりの高さが11~26cmの6段階調節できます。
- 手すりは手をかけやすく、身体を支えやすい形状です。
- グリップは身体の向きに応じて左右どちらでも取り付けできます。
- 浴そう壁取付け部は、滑り止めゴム付きなので、キズや横ズレを防ぎます。
- 締めすぎ防止機能付きなので、締め付け不足や締めすぎによる浴そうの破損を防ぎます。

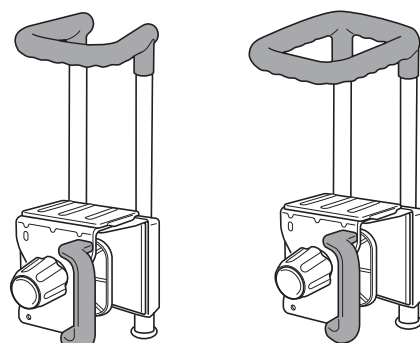

コンパクトハンドル 130

ワイドハンドル 130

各部の名称

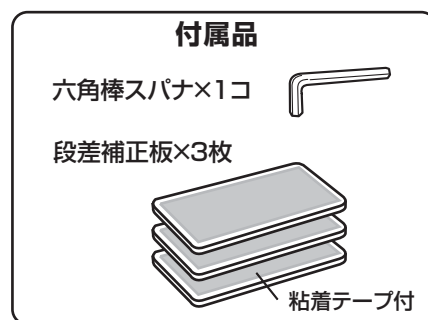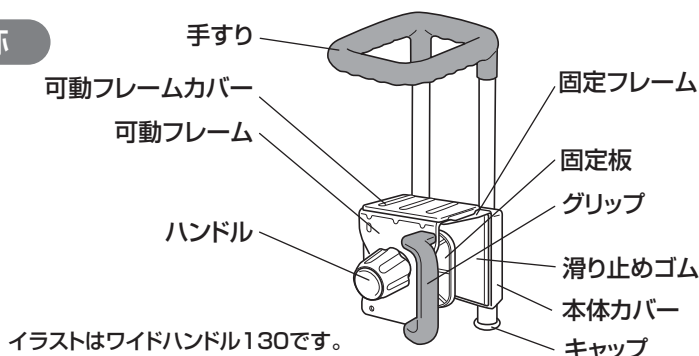

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- 警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

警告

- 使用前に本品を前後左右に揺らしてみ、浴そうにしっかりと取り付けられているか、確認してください。しっかり固定されていないと使用中に本品が外れ転倒するおそれがあります。
- 使用者ご自身が身体の安定を十分に保てない場合は、介助者が付き添いのうえ、使用してください。
- 浴そうの手すりとして使用用途以外は絶対に使用しないでください。
- つぎのような場所は取付けが不安定になりますので、使用しないでください。本品が外れて転倒によるケガの原因や、浴そう壁が破損する場合があります。

- 浴そう壁の厚みが4.5cm未満、13cmを超える場合。
- 浴そう壁が弱く、本品を取り付けたとき変形する場合。
- 浴そう内の浴そう壁取付け部分に曲面がある場合。

注意

- 浴そう壁に段差が付いている場合は必ず段差補正を行ってください。段差の補正を行わない場合や段差補正板が外れている場合、本品が外れて転倒によるケガの原因となったり浴そうを破損させるおそれがあります。
- 浴そうの取付け面および本品に水分や洗剤などが付いている場合は、本品が外れやすくなりますので、乾いた布などでふいてから取り付けてください。
- グリップが必ず浴そうの内側を向くように取り付けてください。取付け方向が逆になると、しっかり固定できないおそれがあります。
- 使用前に手すりおよびグリップの取付けが確実に行われているか確認してください。
- 石けんや洗剤が付着した手で取り扱わないでください。手が滑ってケガの原因となります。

重要


- 手すりおよびグリップを乱暴にゆすったりしないでください。浴そうが損傷するおそれがあります。
- 固定フレーム・固定板の滑り止めゴムがはがれた状態になると取付け力が低下し、本品の滑りの原因となりますので早めに市販の耐水性・耐熱性強粘着両面テープで貼り替えてください。
- 本品の改造はしないでください。
- 直射日光に当てないでください。変形・変質のおそれがあります。
- 火気に近づけないでください。変形・変質のおそれがあります。
- 温泉水や入浴剤は使用しないでください。劣化の原因となります。

取り付けできない浴そう

1 ポリ浴そうなど、浴そう外側のエプロン部を取り外しできる浴そう



2 浴そう壁の厚みが4.5cm未満、13cmを超える浴そう

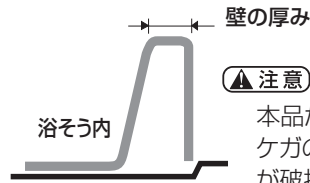


注意

本品が浴そうから外れ転倒や、ケガの原因となったり、浴そうが破損することがあります。

3 据置式浴そう(浴そうが床面に置かれており、浴そうの前面がすべて見える浴そう)

取り付けできない浴そうの面

- 着脱可能なエプロン部。
- 上縁部に継ぎ目がある。
- 洗い場下側に手の入るすき間がある。

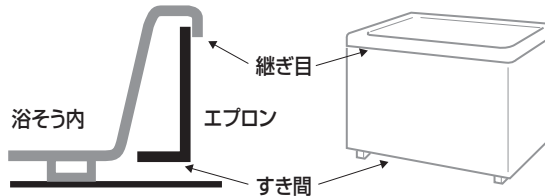


左記の内容が該当する浴そうには本品を取り付けないでください。なお、詳しい判断がつきにくい場合は、現在お使いの浴そう製造メーカーまでお問い合わせください。

段差補正板を使用することで取り付けできる場合

付属部品	
段差補正板(16×6×厚さ0.5cm)×3枚	
段差厚み	段差補正板必要枚数
0.1~0.5 cm	1枚
0.6~1.0 cm	2枚
1.1~1.5 cm	3枚

重要


複数枚使用するときには両面テープのハクリ紙をはがし、重ね貼りしてお使いください。

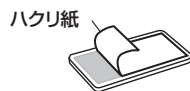

段差が1.5cm以下の場合


リム高さ3cm未満の場合

浴そう手すり本体の滑り止めゴム部下端に合わせた位置へ、段差補正板を貼り付けます。

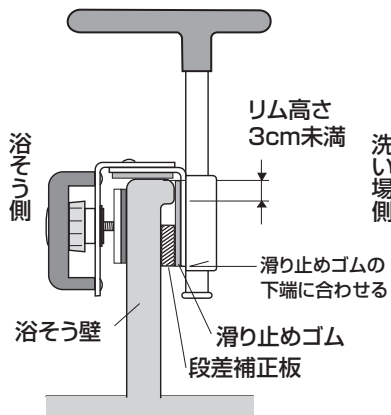


リム高さ3cm以上の場合

リム下端に接する位置へ、段差補正板を貼り付けます。

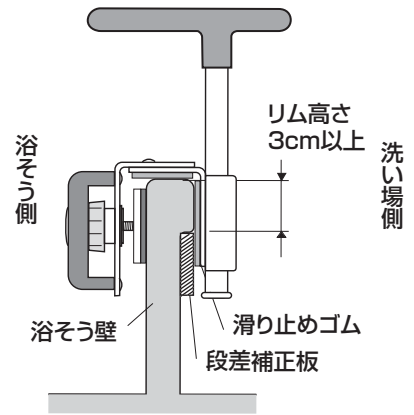


段差補正板では取り付けできない場合

木板、または硬いゴム板を別途で用意ください。

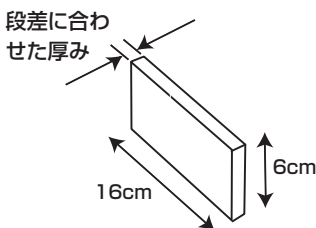


段差が1.6cm以上の場合

段差に合わせた厚みの平坦で無垢の木板、または、硬いゴム板を別途で用意いただき、取り付けてください。

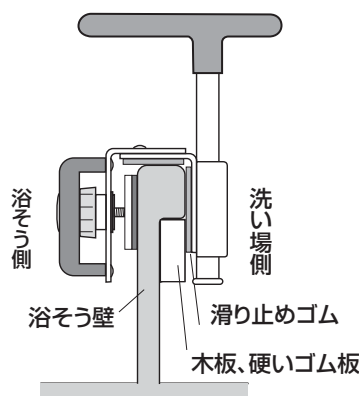

注意


浴そうの段差を補正せずに取り付けると本体が傾き大変危険です。

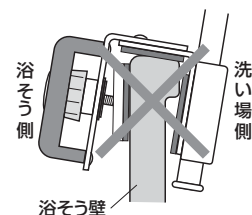


本品の取付け幅を調節する

… 本品を取り付けできる浴そう壁の厚みは4.5～13cmです。

1 取り付けたい場所の厚みを測る

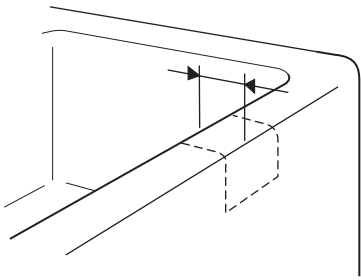


2 可動フレームカバーを外す

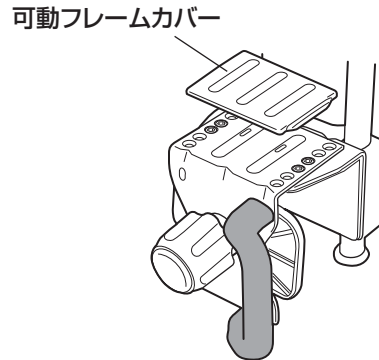

3 フレーム組付け用ネジを外す

付属の六角棒スパナでフレーム組付け用ネジ(4本)を外します。

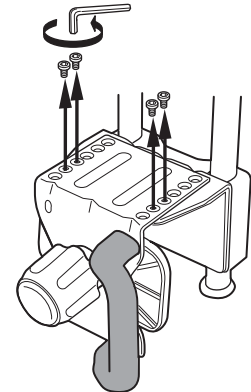


4 本品の取付け幅を浴そう壁の厚みに合わせる

取付け幅は5段階に調節できます。図を参考に位置を決めます。


約4.5～7.0cmの場合	約7.1～8.5cmの場合	約8.6～10.0cmの場合
<p>可動フレーム</p> <p>浴そう壁</p>		
約10.1～11.5cmの場合	約11.6～13.0cmの場合	

5 フレーム組付け用ネジを締める

付属の六角棒スパナでフレーム組付け用ネジ(4本)を入れます。

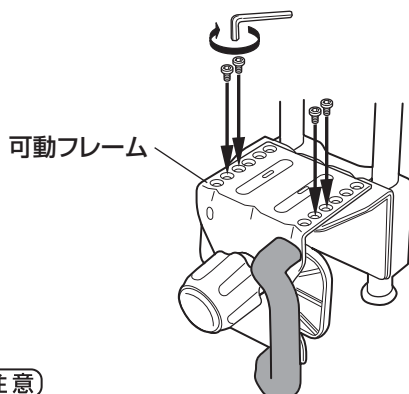

6 可動フレームカバーをセットする

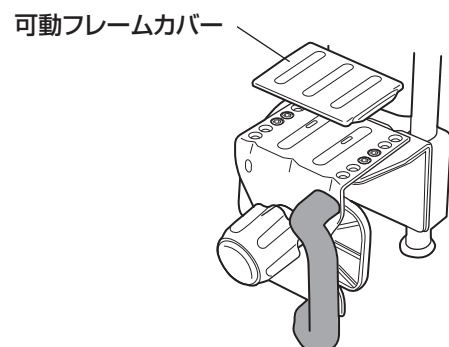

▲ 注意

●4本のネジを軽く仮止めした後、最後に再度強く締め直してください。


グリップの取付け位置を決める

グリップは本品の設置状況に合わせて左右どちらへでも取付けが可能です。手すりの取付け位置、および、グリップの使用方向をよく確認してからグリップの組立てを行ってください。グリップの使用方法は6ページの「使用方法」グリップの使い方の使用例を参考にしてください。

- 出荷時は右位置に取り付けた状態になっています。


グリップを可動フレームの右位置に取り付ける場合

- 出荷時は右に取り付けてあります。そのままご使用ください。

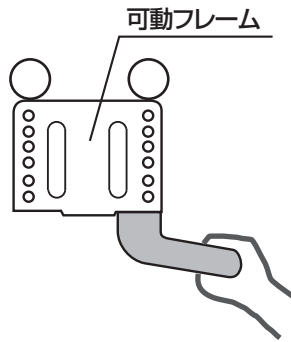

グリップを可動フレームの左位置に取り付ける場合


- 4ページの「グリップの付け替え方法」を参考に、組付け用ネジを外し、付け替えてください。

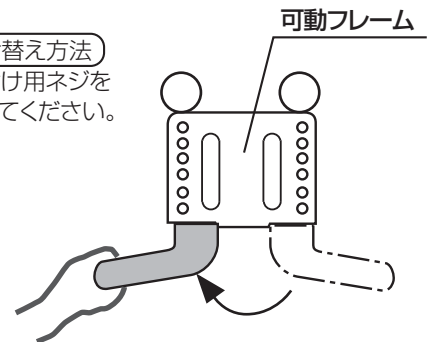

グリップの付け替え方法


1 グリップ組付け用ネジを外す

付属の六角棒スパナでグリップ組付け用ネジ(2本)とブラワッシャー(2コ)を取り外します。

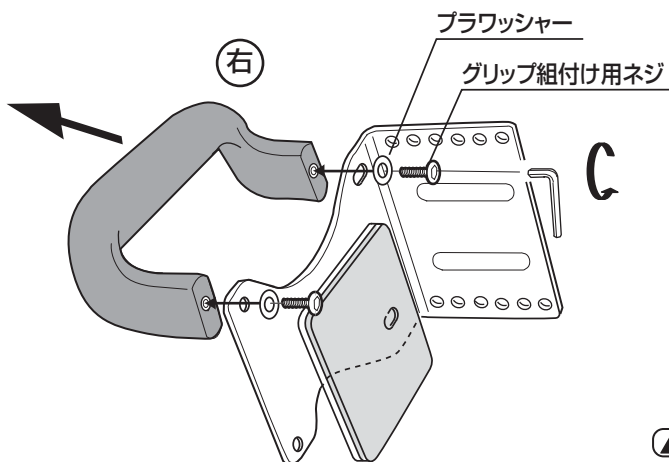


2 グリップ組付け用ネジを締める

グリップの取付け方向を確認し、1で外したグリップ組付け用ネジ(2本)とブラワッシャー(2コ)でしっかりと締め付けます。

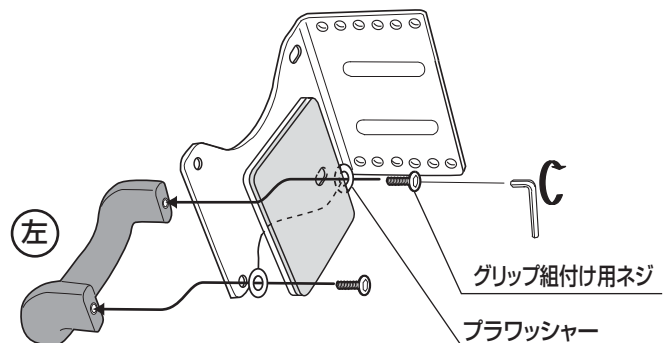

▲注意

- グリップ組付け用ネジは最後までしっかりと締めてください。しっかり締めないと使用中にネジが緩み、グリップが外れ、転倒するおそれがあります。
- グリップ組付け方向に注意してください。

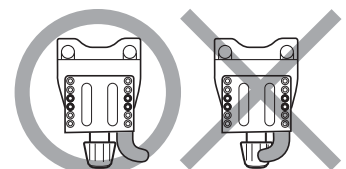

本品を浴そうに取り付ける


▲注意

- 石けんや洗剤が付着した手で取り扱わないでください。手が滑ってケガの原因となります。
- 浴そうの外壁と内壁が平行に近い場所を選んでください。壁が湾曲している場所には取り付けできません。

1 水分、洗剤などをふき取る


▲注意

- 浴そうの取付け面、本品に水分や洗剤などが付いている場合は十分な取付け力が得られません。乾いた布などでふいてから取り付けてください。

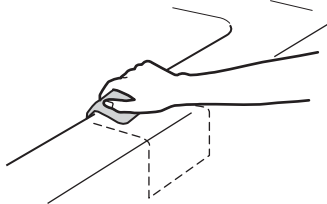

2 本品を浴そうに取り付ける

ハンドルを「ゆるむ」方向へ回し、固定板を広げます。手すりとグリップの向きが浴そうの内側になるようにセットし、ハンドルを「しめる」方向へゆっくり回します。ハンドルは締め続けると「カチッ」と音がします。十分に締め付けるため3回程度、音がするまで締めてください。

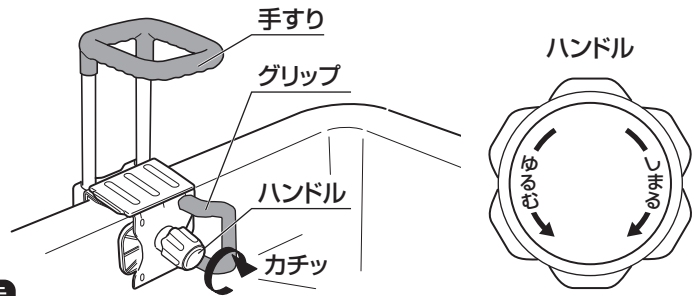

▲警告

- 浴そうの取付け面および本品が汚れているとしっかり固定できません。


▲注意

- グリップが必ず浴そうの内側を向くように取り付けてください。取付け方向が逆になるとしっかり固定できません。
- ハンドルがしっかりと締められているか確認してください。しっかり締めないと使用中にハンドルが緩み、手すりが外れ、転倒するおそれがあります。

手すり高さを調節する ... 手すりの高さは浴そう上縁から11~26cmの間で6段階調節できます。

1 手すり高さ調節用ネジを取り外す

キャップ(4コ)を取り外し、付属の六角棒スパナで高さ調節用ネジ(4本)を取り外します。

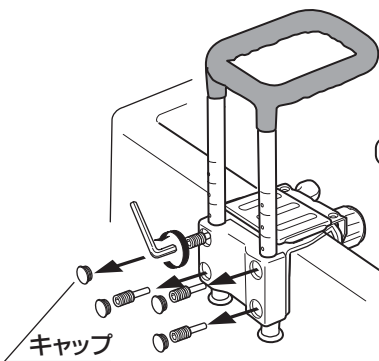


▲注意

- キャップは外れ防止のためきつくはめ込んであります。取り外しの際はキャップの外周部分にマイナスドライバーなどを差し込んで取り外してください。


2 手すり高さを調節する

手すりのパイプ目盛り線を目安に、使いやすい高さを選びます。

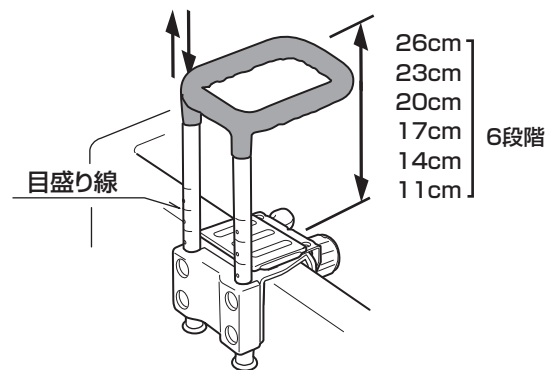

3 手すり高さ調節用ネジで手すりを固定する

手すり高さ調節用ネジの先端がパイプの穴に入るようにして締め込みます。

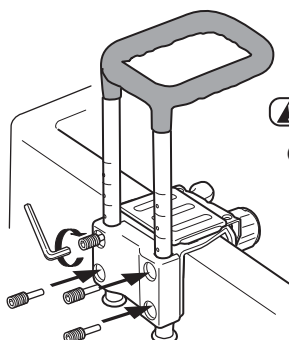


▲注意

- 手すり高さ調節用ネジは最後までしっかりと締めてください。しっかり締めないと使用中にネジが緩み、手すりが外れ、転倒するおそれがあります。

4 取付け状態を確認する


本品を左右にゆすって固定されていることを確認したうえで、キャップをはめ込みます。

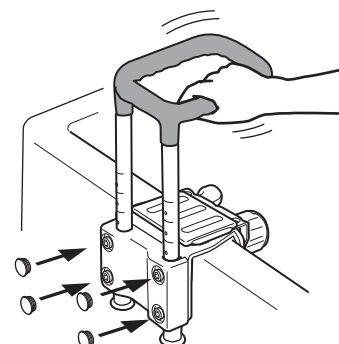

使用方法 … 使用者ご自身が身体の安定を十分に保てない場合は、介助者が付き添いのうえ、使用してください。


●手すりの使い方

手すりにつかまりながら
片足ずつゆっくりと浴そう
壁をまたいで出入りします。

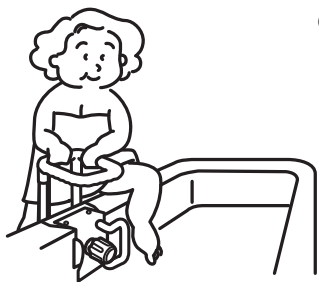

●グリップの使い方

浴そう内で身体の安定
を保つために使います。

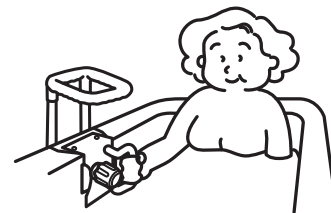

お手入れ方法

- 中性洗剤を水またはぬるま湯でうすめ、やわらかい布かスポンジで洗った後、タオルなどで水気を取り陰干してください。

▲注意

- 漂白剤やカビ取り剤は絶対に使用しないでください。本品の劣化やサビを発生させるおそれがあります。
- 直射日光に当てないでください。色あせ、ひび割れの原因となります。

防カビ加工について

本品は、以下の箇所に防カビ加工を施しています。防カビ加工品とは、防カビ加工されていない製品の表面と比較し、特定のカビの生育が基準より抑えられているものです。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいています。

防カビ加工部位	表面(手すり・グリップ)・キャップ・滑り止めゴム
防カビ加工方法	練り込み



▲注意

- 防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
- SIAAの安全性基準に適合しています。
- 防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- 特定のカビの生育を抑制します。
- このマークはカビが発生しないことを保証するものではありません。
- 使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- 石けんカスなどの付着がカビの原因となります。
- 高温・多湿の環境で放置するとカビの原因となります。
- 防カビ剤の有効期間は実際使用される環境により異なります。

仕様

品名	浴そう手すりN(防カビプラス)	
	コンパクトハンドル130	ワイドハンドル130
サイズ	幅17.5 × 奥行21.5~27 × 高さ 39(cm)	
浴そう壁取付け対応幅	4.5~13(cm) 5段階	
手すり有効高さ (浴そう上縁から手すり上まで)	11・14・17・20・23・26(cm) 6段階	
材質	手すり芯部、フレーム：ステンレス(ポリエステル塗装) グリップ芯部：ナイロン 手すり表面、グリップ表面、キャップ：熱可塑性エラストマー 滑り止めゴム：合成ゴム ハンドル、段差補正板、可動フレームカバー：ポリプロピレン 本体カバー、固定板：ABS樹脂 ハンドルネジ部：真鍮	
重量	3.4 kg	3.6 kg
耐熱温度	70℃	
最大使用者体重	80 kg	

メモ

保証書

保証基準

- ① 本品の品質保証期間は、お買い求めになった日より1年間です。
- ② 保証期間内に故障して無料修理・交換を受ける場合には、本書をご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ③ 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - ・本書のご提示がない場合。
 - ・本書に商品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ・使用上の誤り、不適切な手入れ、不当な修理や改造などによる故障または損傷。
 - ・天災地変、事故、落下による故障や損傷。
 - ・消耗品の劣化、損傷、汚れ。
 - ・実費修理の際に要する運賃などの諸経費。
 - ・製品による二次的な損傷や損害。
 - ・業務用、施設用など一般家庭以外で使用された場合。
 - ・ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップなどにより第三者から購入したり譲渡を受けた使用経緯の確認できない製品。
- ④ 原則として、一度ご使用になった製品は、お取り替えすることはできません。故障箇所の修理・交換で対応いたします。
- ⑤ 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスは受付できません。
- ⑥ ご贈答、ご移転で本書に記入してある販売店に修理を依頼できない場合はお客様相談室へご相談ください。
- ⑦ 本品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。
- ⑧ 製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。
- ⑨ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理・交換をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、この保証期間後の修理などについてご不明な場合は、お客様相談室にお問い合わせください。


商品名		ロット番号 (本体カバー底側のシールをご覧ください。)		
お買い上げ 年月日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より1年 (ただし、保証基準による)	故障内容記入欄
お客様	ご住所(〒 -)	住所(〒 -)		
	お名前	販売店 店名		
	電話番号 - -	電話番号 - -		

- お買い上げ後、商品名・お買い上げ日・お客様名・販売店名・ロット番号をただちに記入願います。
- ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。
- 本書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

販売店発行のレシート(領収書)を保管していただき、本書を提示していただく際に添付してください。

領収書(レシート)貼付け欄

製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

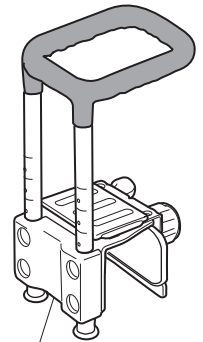

ロット番号
(本体カバー底側)

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
 Designed by Richell Corp., Japan
 MADE IN CHINA

