

おしりシャワー 300 プラス

【使用方法】

- ①キャップを外して、水または40℃以下の温水を入れます。
- ②キャップをしっかり閉めます。
- ③本体容器を押して、おしりを洗います。



キャップ内側のグレーの「オーリング」がきちんとはまっているか確認してください。はまっていないと漏れる原因になります。



【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 用途以外での使用はしないでください。
- 臀部に炎症、その他異常のある場合は、使用前に医師に相談してください。
- 容器内の液温を確認してから使用してください。ヤケドのおそれがあります。また本体を押さえるときは出方をみながら調整してください。
- 煮沸・電子レンジでの消毒・加熱はしないでください。

【洗浄・消毒時の注意】

- キャップ内にオーリングがあります。洗浄のときに粉失ないように十分注意してください。
- 洗うときは水または温水を使用してください。
- みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでこするとキズがつくおそれがあります。
- 薬液消毒をするときは、各消毒液の使用法にしたがってください。

部品名	材質	耐熱温度	最大目盛容量
キャップ・ボトル	ポリプロピレン	75℃	300mL
オーリング	シリコンゴム		

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corporation
MADE IN JAPAN