

使っていいね!

飲みやすいストローコップ 300 ＜取扱説明書＞

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しく下さい。

仕様

＜対応表＞

○：できる ×：できない ー：該当しない

部材名	材質	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱※	消毒方法			食器洗い乾燥機
					煮沸	薬液	電子レンジ	
キャップ・フタ・ハンドル	ポリピロピレン	140℃	-20℃	ー	○	○	○	○
飲み口・バックン・ストロー	シリコンゴム	140℃	-20℃	ー	○	○	○	○
ボトル	飽和ポリエステル樹脂	110℃	-20℃	×	○	○	×	○

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00~17:00 (土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA 2106

ボトル容量 380mL
最大目盛り 300mL

※電子レンジ加熱とは、
容器に飲食物を入れて
加熱することです。

用途

- ストローで飲料を飲むために使用するものです。

使用上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

▲警告

- 用途以外に使用しないでください。
- 飲み物は40℃以下に冷ましてから入れてください。熱い飲み物を入れると噴き出してヤケドをするおそれがあります。

▲注意

- 安全のため、破損や著しく変形したものは使用しないでください。使用のたびに亀裂やキズ、破損などが無いか確認してください。
- 本品は完全密閉ではありません。飲み物が入った状態で倒したり、振ったりすると飲み物が漏れることがあります。
- 飲み物が漏れないよう各パーツを正しく取り付け、フタをしっかりと締めてください。また、使用する前にしっかりと締まっているか確認してください。
- 強い衝撃や気温、気圧の変化などにより容器内の空気が膨張し圧力が高まると、飲み物が噴出することがあります。
- ドライアイスや炭酸飲料を入れないでください。飲み物や炭酸ガスが噴出することがあります。
- 液漏れすることがありますので、飲み物を入れて振り回したり、バッグなどに入れて携帯したりしないでください。
- 飲み物を入れ、暖房機の周辺や、直射日光の当たるところに放置すると、飲み口から飲み物が噴出することがあります。

重要

- 火のそばに置かないでください。食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。変形したり溶けたりすることがあります。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。本品が破損する原因となります。

使用する前に

- 初めて使用する前に必ず洗浄してください。

重要

- 着色された飲み物、果汁、お茶などの場合、本体などに色がつくことがありますので、使用後はすみやかに洗浄してください。ただし、色がついては衛生上は問題ありません。
- ボトルにラップフィルムは使用しないでください。飽和ポリエステル樹脂の性質によりラップフィルムがボトルにくっついてはがれなくなることがあります。
- 熱湯をボトルに入れて、すぐにフタを締めた場合、熱さでボトルが変形し、元に戻らないことがあります。

【シリコンゴム製パーツの注意】


- 使用する前に、破れや異常がないことを確認してください。
- 古くなり劣化すると、弾力性を失い、破れやすくなります。
- 強く噛むと、飲み口が破損することがあります。
- 破損や劣化がみられる場合は使用を中止し、新しい部品とお取り替えください。飲み物が漏れることがあります。より衛生的にお使いいただくためにも、早めに取り替えてください。

お手入れ方法

- 洗浄・消毒の際は各パーツに分解してください。
- 使用後はお手入れ方法にしたがって十分洗浄し、よく水を切って乾かしてから保管してください。
- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。
- 洗浄の際はやわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。そして洗剤が残らないよう十分すすいでください。
- みみがき粉やクレンザー、たわしなど硬いものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 煮沸消毒の際はヤケドなどに十分に注意してください。大きな鍋にたっぷり水を入れ、よく洗浄した本品を入れ、火にかけて沸騰させます。煮沸消毒は、3～5分を限度としてください。鍋肌に触れると変形する場合がありますのでご注意ください。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので避けてください。なお、漂白するときは台所用漂白剤を指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30～40分を限度としてください。
- 漂白後は、流水で漂白剤をきれいに洗い流してください。飲み物に臭いが残ることがあります。
- 薬液消毒の際は各消毒液の使用方法にしたがってください。
- 電子レンジによる蒸気消毒の際は各消毒専用容器の取扱方法にしたがってください。本品のみを電子レンジに入れても消毒できません。

特長

- ボトルが透明で中身が見やすいです。
 - 大きく見やすい目盛り付です。
 - 飲み口がやわらかく、口当たりがやさしいです。
 - ハンドルが左右付け替えできます。
- 取り付ける際は、目盛りが背面にくるように取り付けてください。

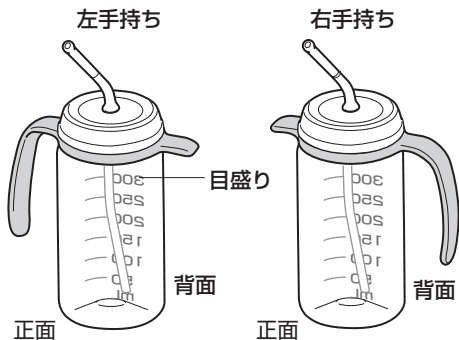

別売りパーツについて

別売りパーツの購入は、販売店または弊社ウェブサイト内「部品の購入」でご確認ください。




JANコード：4945680-400510
商品名：ストローセット KA




JANコード：4973655-009697
商品名：パッキンKB

組立方法

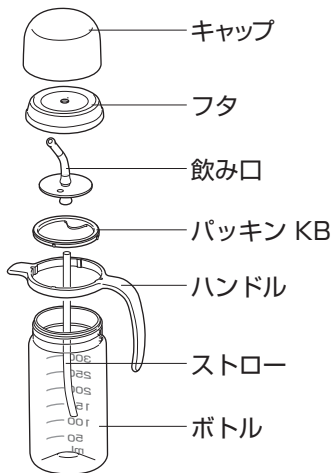

①フタに飲み口を取り付ける。


フタ裏側から飲み口の先端を差し込みます。
フタ裏側の凸部と飲み口の凹部を合わせます。

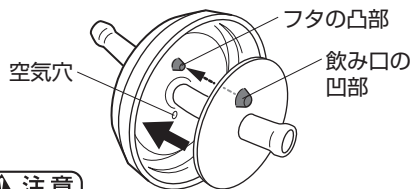

▲注意


フタ裏側の凸部と飲み口の凹部がしっかり合っていないとパッキンを取り付けても飲み物が漏れます。

飲み口の先端を引っ張り、フタ表側に飲み口のくびれを出します。

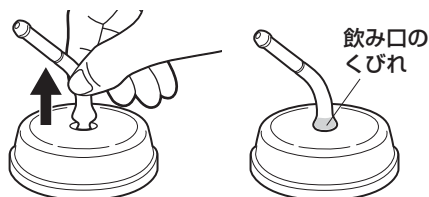


②フタにパッキンを取り付ける。

丸い突起がボトル側を向くようにします。

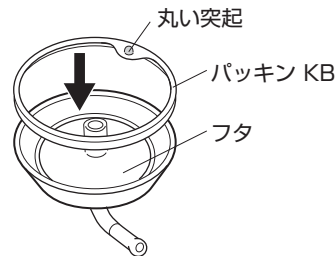


③飲み口の根元にストローを奥まで差し込む。

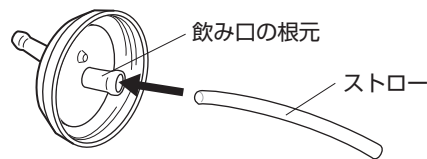

④ボトルにハンドルを取り付ける。

ボトルの凸部にハンドルの凹部が合うように取り付けます。

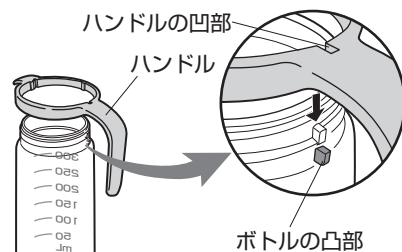


▲注意


フタを締めてない状態でハンドルを持たないでください。ボトルが倒れて飲み物がこぼれるおそれがあります。

ハンドルには凹部が2箇所あります。どちらか一方の凹部をボトルの凸部にはめてください。


<真上から見た図>

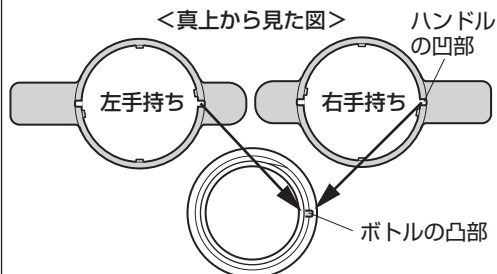

⑤ボトルにフタを取り付ける。

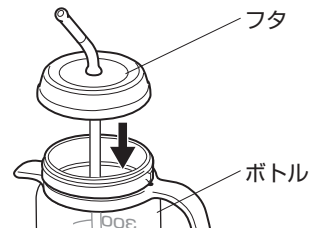

真上から見て以下の位置に飲み口の先端がくるように締め付けます。

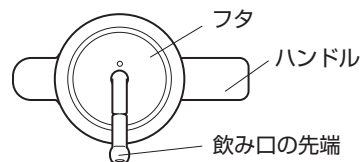

⑥フタにキャップを取り付ける。

