

【使用方法】

ほどよい角度でらくらく洗浄


①キャップを外して、水または温水を入れます。



②キャップをしっかり閉めます。



③キャップ先端を臀部に向け容器中心部を押して洗浄します。

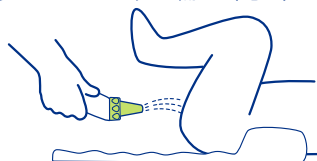

※臀部洗浄の際は周囲を汚すおそれがありますので、「紙おむつ」を敷いたり、「差し込み便器」などを併用してください。

【使用上の注意】

- 臀部に炎症、その他異常がある場合は、専門医の指示を受けてください。
- 製品を傷めますので、過度の煮沸をしないでください。煮沸消毒をするときは、3～5分煮沸してください。
- お湯などを入れてキャップをしたままストーブなどの熱源機器の周辺や、直射日光の当たる場所に置かないでください。容器内の空気が温度変化により、キャップからお湯が噴出することがあります。
- 火のそばに置かないでください。
- 用途以外での使用はしないでください。
- たわし、または、みがき粉で磨くと、キズがつくことがあります。
- 塩素系漂白剤は、光沢が落ち、黄ばみの原因になりますので、使用しないでください。
- 電子レンジの加熱はしないでください。軟化し変形などの原因となることがあります。
- 容器内の液温を確認してから使用してください。ヤケドの原因となります。また本体を押さえるときは出方をみながら押さえ、調節してください。

部品名	原料樹脂	耐熱温度
キャップ・ボトル	ポリプロピレン	100℃

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間: 9:00～17:00

(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corporation

MADE IN JAPAN



1507