


ラクリンバッグN

【特長】トイレに袋を取り付けることで、排泄物の後処理が簡単にできます。


【使用方法】

1 吸水パッド

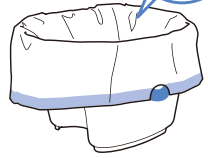


袋を開いてポータブルトイレのバケツにかぶせ、吸水パッドが底面にくるようにセットします。

2

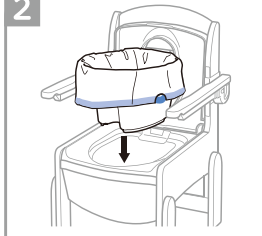


袋をかぶせたバケツをポータブルトイレにセットします。

3




セット後、便座を下ろして使用します。

4

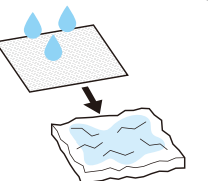


使用后、尿が吸水パッドによりジェル化します。

5

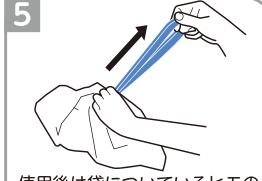

使用後は袋についているヒモの両端を図のように持ち、引っばってください。

さらに密閉



引っばり出したヒモは、感染防止などのために、開口部の周囲を一周させて固く縛って密閉することをおすすめします。

【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 用途以外での使用はしないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 高温多湿を避けて保管してください。
- 袋にキズをつけないでください。
- 吸収回数は排尿量によってばらつきがあります。
- 吸収量を超えるとジェル化できなくなります。
- 大便はジェル化しません。排便後は速やかに処分してください。

- 本品をトイレに流さないでください。
- 再使用はしないでください。
- 処理方法はお住まいの地域のルールにしたがってください。

サイズ	袋:65×38(cm)
材質	袋・ヒモ :ポリエチレン 吸水パッド:セルロース・ポリアクリル酸ナトリウム
吸収量	700mL

排尿4回分(目安)
1回の排尿量150mLとして

上記数値は当社測定方法によるものです

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00 ~ 17:00
(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA