

## 洗浄用ボトル シャワそう

ベッド上での洗浄に最適。  
洗髪やおむつ交換、ポータブルトイレ  
使用時に便利です。

- ノズルが切替えでき、シャワーとストレートの噴射パターンが選べます。
- 止水機能が付いており、携帯時に漏れにくくなっています。
- ジャバラ付ノズルで、洗浄角度が変えられます。

### 各部名称




## 使い方

1. キャップを外して、水または温水を入れてキャップをしっかり閉めます。



2. ノズルを回し、噴射パターンを選びます。

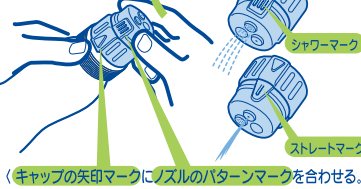

(キャップの矢印マークにノズルのパターンマークを合わせる。)

3. ノズルの向きを調整し、本体中心部を押して洗浄します。


ジャバラ部分を曲げることで、  
ノズルの角度を変えられます。



※ 洗髪の際は周囲を汚す場合がありますので、「タオル」を敷いたり、「洗面器」などを併用してください。

※ 臀部洗浄の際は周囲を汚す場合がありますので、「紙おむつ」を敷いたり、「差込み便器」などを併用してください。

4. 使用後はノズルを止水の位置に合わせ、閉じます。

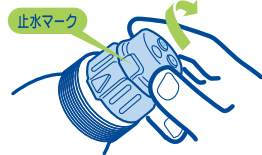

※ 携帯の際は、ノズル部を上に向けて、持運びください。

## 警告

- 本体に高温のお湯などをいれてキャップを閉めないでください。本体内の空気が膨張して、ノズルからお湯が噴出しやけどの原因となります。

## 注意

- 臀部に炎症、その他異常がある場合、専門医の指示を受けてください。
- 煮沸消毒はしないでください。本体が変形する原因となります。
- ご使用の際はぬるま湯を本体に入れて使用してください。高温のお湯を直接本体に入れるとジャバラの性能が低下するおそれがあります。
- 携帯時は、必ずノズルを閉め、本体が倒れたり、押しつぶされないようにして、ポリエチレンなどの袋に入れてください。衝撃や本体内の温度変化などにより液もれすることがあります。
- お湯などを入れてキャップをしたままストーブなどの熱源機器の周辺や、直射日光の当たる場所に放置しないでください。温度変化により本体内の空気が膨張し、ノズルからお湯が噴出することがあります。
- キャップの内側にOリングがあります。洗浄の際など紛失しないように十分注意してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 用途以外での使用はしないでください。
- 塩素系漂白剤は、光沢が落ち黄ばみの原因になりますので、使用しないでください。
- 本体内の液温を確認してから使用してください。やけどの原因となります。お湯などの出方をみながら本体を押さえる力を調整してください。

〈原料樹脂〉 本体・キャップ・ノズル ポリプロピレン  
                  Oリング                  シリコンゴム  
〈容量〉 450ml (最大目盛り容量)  
〈耐熱温度〉 90℃

## 洗浄用ボトル シャワそう

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

### 株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
(受付時間: 土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)  
<http://www.richell.co.jp/>



MADE IN JAPAN

1105