

## おしりシャワー

排便後の洗浄に最適。シャワーで汚れを洗い流すことにより臀部の清潔を保ちます。

- ノズルが切り替えでき、シャワーとストレートの噴射パターンが選べます。
- 止水機構が付いており携帯時に漏れにくくなっています。
- 角度付ノズルで、洗浄作業がしやすくなっています。
- 大人約2回分の洗浄作業が可能です。



## 使い方

1. キャップを外して、水または温水を入れます。

2. キャップをしっかり閉めます。

3. ノズルを回し噴射パターンを選びます。

シャワーマーク      ストレートマーク

(キャップの矢印マークにノズルのパターンマークを合わせる。)

4. ノズルを臀部に向け容器中心部を押して洗浄します。

※ 臀部洗浄の際は周囲を汚すおそれがありますので、「紙おむつ」を敷いたり、「差し込み便器」などを併用してください。

5. 使用後はノズルを止水の位置に合わせ、閉じます。

止水マーク

※ 携帯の際は、ノズル部を上に向けて、持ち運びください。

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
## 警告

- 本体に高温のお湯などを入れてフタを閉めないでください。容器内の空気が膨張して、ノズルからお湯が噴出しヤケドの原因となります。

## 注意

- 臀部に炎症、その他異常がある場合は、専門医の指示を受けてください。
- 携帯時は、必ずノズルを閉め、本体が倒れたり、押しつぶされないようにして、ポリエチレンなどの袋に入れてください。衝撃や容器内の温度変化などにより液漏れすることがあります。
- 製品を傷めますので、過度の煮沸をしないでください。煮沸消毒をするときは、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ2～3分煮沸してください。
- お湯などを入れてキャップをしたままストーブなどの熱源機器の周辺や、直射日光の当たる場所に置かないでください。容器内の空気が温度変化によりノズルからお湯が噴出することがあります。
- キャップの内側にOリングがあります。洗浄の際など紛失しないように十分注意してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 用途以外での使用はしないでください。
- たわし、またはみがき粉でみがくと、キズがつくことがあります。
- 塩素系漂白剤は、光沢が落ち黄ばみの原因になりますので、使用しないでください。
- 電子レンジの加熱はしないでください。軟化し変形などの原因となることがあります。
- 容器内の液温を確認してから使用してください。ヤケドの原因となります。また本体を押しさえるときは出方をみながら押さえ調整してください。

〈原料樹脂〉 本体・キャップ・ノズル ポリプロピレン  
 Oリング シリコンゴム  
 〈容量〉 450ml (最大目盛り容量)  
 〈耐熱温度〉 100℃



この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル  
 富山市水橋桜木136 F939-0592  
 お客様相談室/TEL(076)478-2957  
 (受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)  
<http://www.richell.co.jp/>



1105



4 973655 930229

MADE IN JAPAN