

# ストローボトル

水・ジュース・お茶など液状の食べ物にご使用ください。

## 特長

- 吸う力の弱い方でも楽に飲食ができます。
- 楽な姿勢で飲食ができます。
- 飲みものがこぼれにくいので、衣服を汚しません。
- 容器を手で押すことにより、リハビリにも効果があります。

## ⚠️ 飲み下すことに障害のある方へのご注意

- 意識障害のある場合、専門員の指示を受けてください。
- 食事中、介護者は側を離れないでください。
- 誤嚥防止のため麻痺のある患者さんは、側臥位の場合、健側を下にした姿勢で食事をとらせてください。
- 少しずつゆっくり摂取させてください。

## ⚠️ 警告

- 熱い飲み物には使用しないでください。容器内の空気が膨張して飲み口から飲み物が噴出しやけどの原因となりますので、飲み物を40℃以下に冷ましてから口部などをセットしてください。
- 電子レンジやオーブンレンジには使用しないでください。容器が柔らかくなり倒れたりしてやけどの原因となります。


## ⚠️ 注意

- 果汁など色の付いた飲み物により容器やストローなどに色が付くことがあります。使用後はすぐ洗浄してください。ただし色が付いた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 炭酸飲料は入れないでください。飲み口から飲み物が噴出します。
- Oリング・パッキンは漂白した後、食器乾燥機などでの乾燥はお避けください。異臭の原因となることがあります。
- 飲み物を入れて口部などをしたままストーブ・トースターなど熱源機器の周辺や、直射日光の当たる場所に放置しないでください。本体内の空気が膨張し飲み口から飲み物が噴出します。
- 携帯時は必ず飲み口を閉め、容器が倒れたり、押しつぶされないようにしてポリエチレンなどの袋に入れてください。衝撃や容器内の温度変化により液もれすることがあります。
- 使用後は早めに洗浄し、煮沸消毒などをおこなってください。飲み物を入れたままにしますと細菌による感染症や容器の変色、異臭の原因となります。
- 冷凍しますと変形し、もれの原因になりますのでおやめください。

## 取扱い上の注意

- 火のそばに置かないでください。軟化し変形などの原因となることがあります。
- かためのブラシなどでみがくと、キズがつき汚れや白濁の原因となることがあります。
- 過度の煮沸は、製品を早くいためますので避けてください。なお、煮沸消毒するときは、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、2～3分煮沸してください。
- 薬液消毒は哺乳びん、乳首専用の消毒液を使用してください。
- 飲み口の根元にOリングがあります。洗浄の際など紛失しないように十分注意してください。
- 飲み口は確実にストップする位置まで起こして使用してください。
- 傾けないでください。空気穴より飲み物がもれることがあります。

## 各部名称

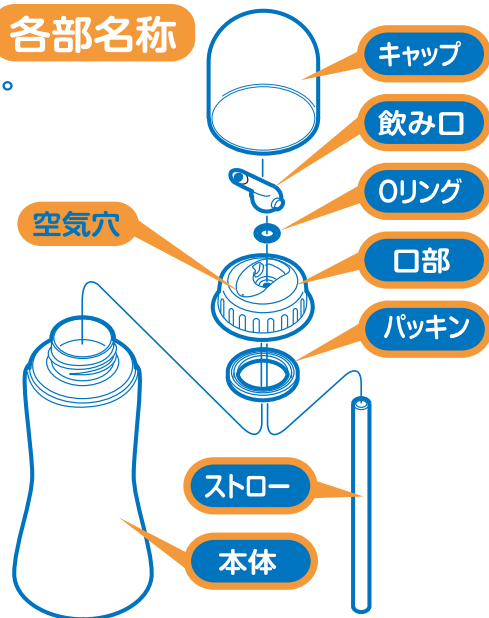

### 〈原料樹脂〉

本体・口部・キャップ	ポリプロピレン
飲み口	ABS樹脂
ストロー・Oリング	シリコンゴム
パッキン	TPE樹脂

〈耐熱温度〉 100℃

〈容量〉 250ml (最大目盛り容量)

- この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

## 株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592

お客様相談室/TEL(076)478-2957

(受付時間: 土日、祝祭日を除く)  
平日9:00~17:00

<http://www.richell.co.jp/>



袋  
0906

MADE IN JAPAN