


〈取扱説明書〉

ペット体重計 KK-5G

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

1.各部の名称

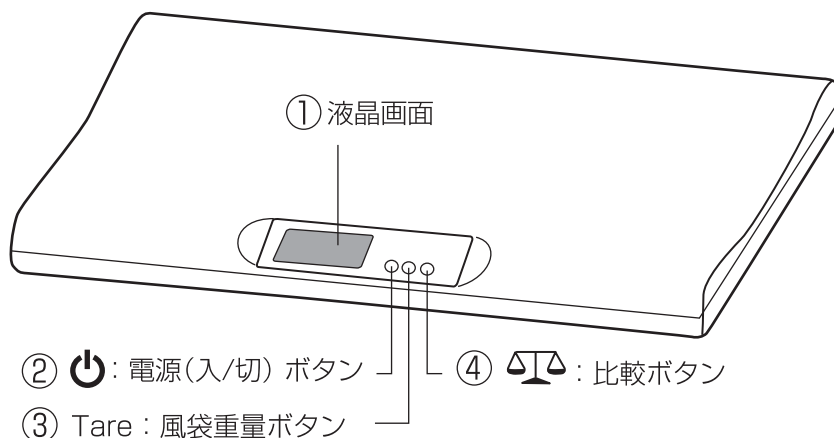

- 〈各ボタンの主な機能〉
- ① ペットの体重やその他の情報を表示します。
 - ② 電源の入り、切りを行います。
 - ③ はじめに量った重量を引くことができます。
 - ④ 比較機能が使えます。詳しくは3ページ **6. 比較機能** を参照してください。

2. 使用上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

▲ 警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

▲ 注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

▲ 警告

- ペットの体重を計量するための体重計です。ペットの体重を計量する用途以外での使用はしないでください。
- 制限体重（18kg）を超えた場合、本品が故障するおそれがあります。
- お客様ご自身で本品を修理しないでください。
- お子様に包装材、特にビニール袋で遊ばせないでください。窒息するおそれがあります。
- 電池は火中に投げ入れないでください。破裂するおそれがあります。

▲ 注意

- 本品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。事故や故障の原因となります。
- 計量中にペットを放置しないでください。事故や故障の原因となります。
- 本品は、少量の水で湿らせた柔らかい布でふいてください。すすいだり、水洗いはしないでください。
- 体重計を使用する際は、電子レンジや、無線LAN、携帯などの電磁波から遠ざけてください。
- 静電気による機能停止の場合は、電池を入れ直して再起動してください。
- 画面に“Err”表示があった場合、電源を切ってください。その後、再起動してください。
- 使用していないときは、体重計の上に何も置かないでください。
- 計量の機能を故障させるおそれがありますので、持続的な負荷をかける使用はしないでください。
- 新しい電池を入れる際は、保存してある重量の記録が消去されます。
- 本品を使用していない状態で1分が経過すると自動的に電源が切れます。
- すぐに電源を切るときは0.5秒以上、電源ボタンを長押しします。
- 本品を激しく動かしたり落下させないでください。
- ペットを乗せたまま移動させないでください。
- 電池の+と-の向きを間違えないように入れてください。

3. 電池の取付け方

1. 体重計を裏返し、底面の電池カバーを外します。
2. 電池収納部に電池の+と-を確認しながら、単3電池2本を差し込み、電池カバーを閉じます。
3. ペットの体重を量るため、安定した平らな面に体重計を置きます。カーペットなどの柔らかい場所は計量に適していません。
4. ペットを体重計に乗せる前に、体重計の表面が濡れておらず乾いていることを確認してください。




4. 計量機能

1. 電源ボタンを1回押すと、体重計の電源が入り、(4.図1) 4つのバーとバッテリーアイコンが表示されます。
2. 「0.000Kg」とバッテリーアイコンが表示されます。(4.図2)
3. 体重計にペットを乗せてください。15秒後「Hold」と表示されたときに重量が決定します。(4.図3)

⚠ 注意

- 画面に表示された体重は、ペットが動くので、計量時に変動します。動いているペットの体重を測定するのに15秒かかります。測定された重量は10秒間表示し、その後自動的に消灯します。



4. 体重が体重計の制限重量(18kg)を超えた場合、「Err」と表示されます。(4.図4)

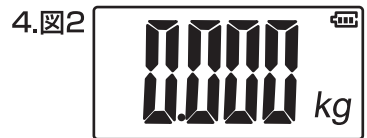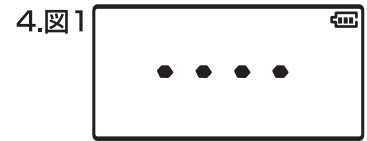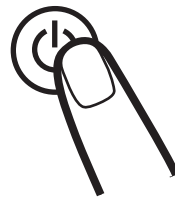

5. 風袋機能

服などを身に付けたペットの体重と何も身に付けていないペットの体重を比較することができます。体重計の上に置かれたバスケットなどの重量を差し引いて、何も身に付けていないペットの体重を計量します。


1. 電源ボタンを1回押すと、体重計の電源が入り、(5.図1) 4つのバーとバッテリーアイコンが表示されます。

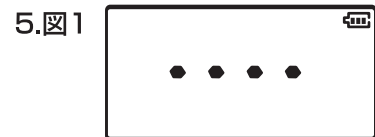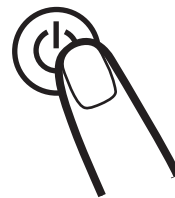


2. 「0.000Kg」とバッテリーアイコンが表示されます。(5.図2)



3. 体重計の上にバスケットを置き、バスケットの重量を表示させます。(5.図3)

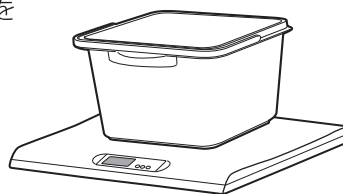

4. 「Hold」と表示されたらすぐに、「TARE」(風袋)ボタンを押します。(5.図4)

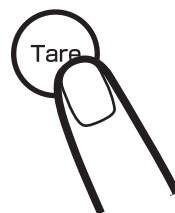

5. 「0.000Kg」、「Tare」(風袋)とバッテリーのアイコンが表示されます。(5.図5)




▲ 注意

- バasketを体重計から取り除くとマイナス表示になります。(5.図6)




6. カゴの上に何も身に付けていないペットを乗せてください。
「Hold」と表示されたときにペットの体重が表示されます。
体重計の画面は、10秒後自動的に消灯します。(5.図7)

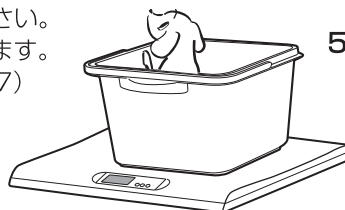

6. 比較機能

ペットが食べた食事や水の量を計量することができます。

1. ペットに食事を与える前に、体重を計量します。
2. ペットを体重計から降ろし、食事を与えます。
3. 食事を与えた後、比較ボタンを1回押すと体重計の電源が入ります。4つのバーとバッテリーアイコンが表示されます。(6.図3)
4. 食事を与える前のペットの体重が表示されます。(6.図4)

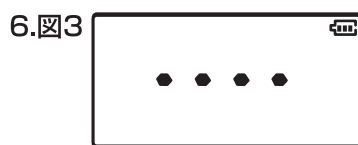

▲ 注意

- ここではマイナス表示になります。
5. 体重計の上に食事を与えたペットを乗せると、食べた食事の重量が表示されます。(6.図5)



< 使用例 >


食事を与える前の体重が8.0Kgのペットの場合。計量後に保存された8.0Kgは、通常の重量機能として測定されます。比較ボタン(△)を押すと「-8.000Kg」(マイナス8.0Kg)が表示されます。食事を与えたペットを体重計に乗せると、食べた食事の重量が表示されます。320gの食事を食べた場合、「0.320Kg」と表示されます。

7. お手入れ方法

- 汚れた場合は、中性洗剤を水で薄め、固く絞ったタオルでふき取ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は使用しないでください。変色の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色の原因となります。

8. 仕様

※電池は本品に付属していません。

品名	ペット体重計 KK-5G		
サイズ	幅54 × 奥行34.5 × 高さ5.7 (cm)	測定単位	0.005kg
重量	1.78 kg	測定範囲	0.02kg~18kg
電源	単3電池 × 2本	作動温度	10℃~40℃
電池量表示	電池残量が無くなると  アイコンが点灯	保管温度	-10℃~55℃
重量単位	キログラム(kg)	材質	本体：ABS樹脂

9. 廃棄方法

- お住まいの各自自治体の指示にしたがい、処分・廃棄してください。
- 地球環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

保証書

保証基準

お客様が取扱説明書にしたがい正常な使用状態で、本製品が故障した場合には、本書の記載内容により無料交換いたします。それ以外については有料とさせていただきます。

1. 本品の保証期間はご購入日より1年間です。
2. 保証期間内に故障した場合は、本書をご提示のうえリッチェルお客様相談室にご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。

- ① 本書のご提示がない場合。
- ② 本書にお客様名、販売店名、ご購入日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ③ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の故障または損傷。
- ④ ご使用方法の誤り、不当な修理や改造などによる故障または損傷。
- ⑤ ご使用開始後にできたキズや自然劣化による損傷。
- ⑥ 本品の性能を超えた場合の故障または損傷。
- ⑦ 天災地変(火災・地震・風水害・雪害)や事故による故障または損傷。
- ⑧ 犯罪などの不法な行為に起因する故障または損傷。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの交換サービスは受付けていません。
 5. 原則として、一度ご使用になった製品は、交換で対応いたします。
 6. 製造中止後の製品については、製品の在庫がなくなった場合、交換できないこともあります。
 7. この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。
したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 8. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※保証期間後の交換などについてご不明な場合は、リッチェルお客様相談室にご相談ください。

商品名	ペット体重計 KK-5G			故障内容記入欄
ご購入日 年月日	年 月 日	保証期間	ご購入日より1年 (ただし、保証基準による)	
お客様	ご住所 (〒 -)	住所 (〒 -)		
	お名前	販売店名		
	電話番号 - -	電話番号 - -		

- お買い上げ後、ご購入日・お客様名・販売店名をただちに記入願います。
- ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日、祝祭日を除く)

<http://www.richell.co.jp/>

MADE IN CHINA