



NEW

ラクリーンバッグ 楽とし

簡単！衛生的！
サッと結んでラクラク処理。

バケツ洗い不要で
排泄物処理の負担を大幅軽減。

ヒモ付きで素早く袋の口を密閉することができます。



気になるニオイも軽減し、
手軽で衛生的に排泄物を処理することができます。


巾着タイプのヒモで簡単処理



両端のヒモを引っ張り、袋の口を結ぶだけで
ニオイの漏れを防ぎ、簡単にゴミとして処理
できます。

※処理方法は住まいの地域のルールに従ってください。

抜群の吸収力

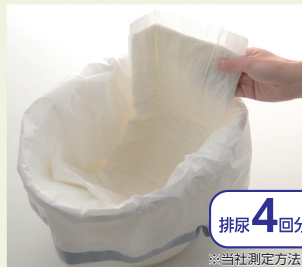

排尿 **4** 回分 (目安)

※当社測定方法により

尿 4 回分 (1 回の排尿量 150mL 想定)
をしっかり吸収する吸収パッドが
入っています。

不快なニオイ軽減



尿を素早くジェル化することにより、
アンモニア臭の発生を抑制します。



一般的なポータブルトイレに使用できます。

ポータブルトイレのバケツに袋をかぶせるだけで
簡単にセットできます。


ラクリーンバッグ 楽とし 30枚入

品番	参考価格(税抜)	入数	サイズ(cm)	材質	コード
140039	¥4,200	8	袋: 59×42×0.04H 吸収パッド: 51×21×0.3H	袋・ヒモ: ポリエチレン、 吸収パッド: 不織布・ ポリアクリル酸ナトリウム・セルロース	4945680 40039-8
●個装サイズ/22×31×21(cm) ●吸収量: 680mL					

楽とし 使用方法




袋を開き、ポータブルトイレのバケツにかぶせ、吸収パッドが底面にくるようにセットします。

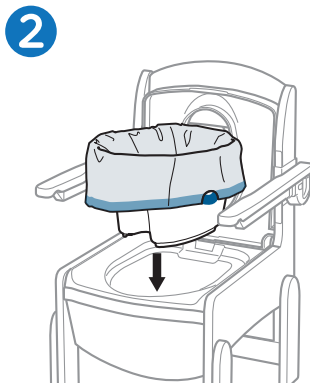


袋をかぶせたバケツをポータブルトイレにセットします。



セット後、便座を下ろして使用します。

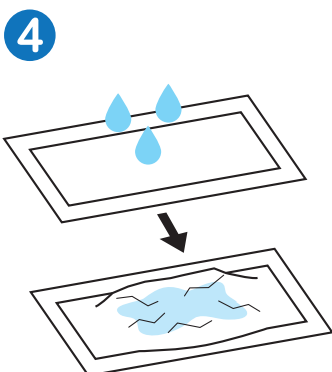

使用後、尿が吸収パッドによりジェル化します。

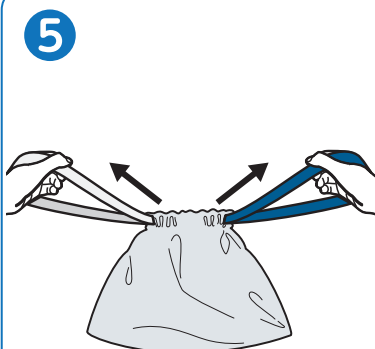

使用後は袋についているヒモの両端を引っばってください。



引っぱり出したヒモは、感染防止などのために、開口部の周囲を一周させて固く縛って密閉することをおすすめします。

■ ご注文・お問い合わせは下記へ