

使っていいね！ すべりにくいグリップ



使っていいね！

すべりにくいグリップ


- スプーン・フォーク・歯ブラシ・筆記用具などに取り付けるグリップです。
- 滑りにくく、しっかり握ることができます。

【取付方法】

- 本品に、取り付ける柄を差し込みます。



※ゆるい場合は、90°回転して差し込むと、安定しやすくなります。

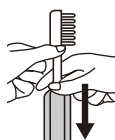


【取外し方法】

- 取外しの際は、製品の上端部を持ち、引き下げてください。



対応サイズ

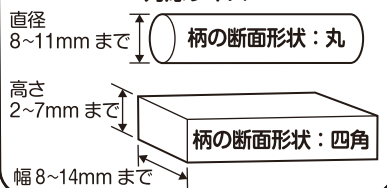

【取扱い上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 鋭利なものに触れると本体にキズが付くおそれがありますので注意してください。

【お手入れ方法】

- お手入れの際は、市販のストローブラシなどを使用して洗浄してください。

原料樹脂	耐熱温度	食器洗い乾燥機
シリコーンゴム	140℃	○

使っていいね！
すべりにくいグリップ



この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

1611